

BLIMO

BRUGERVEJLEDNING - BLIMO X-1400 PREMIUM



1 Sikkerhed

X-1400 Premium må kun betjenes af en enkelt person, som ikke lider af nogen tilstand, der forringer synet, hørelsen, synsevnen eller evnen til at reagere på pludselige ændringer i omgivelserne. Hvis du lider af noget af ovenstående, anbefales det, at du søger råd hos din læge, inden du betjener X-1400 Premium.

- Kør kun over forhindringer og op ad kantsten på det laveste punkt og i ret vinkel.
- Pludselige sving eller pludselige hastighedsændringer frarådes.
- Undgå stejle overflader, hvis der er risiko for udskridning på grund af isglatte eller våde overflader.
- Undgå at køre over løse overflader såsom grus.
- Kør altid lige op ad stigninger, dvs. kør ikke i zigzag.
- Vend ikke X-1400 Premium på skrånende overflader.
- Kør ikke X-1400 Premium ned ad trapper.
- Kør altid fremad ned ad hældninger, kantsten og andre forhindringer.

1.1 Anti-tip-hjul

X-1400 Premium er udstyret med bageste anti-tip-hjul. Disse er en sikkerhedsforanstaltning, som aldrig bør benyttes under normal drift. De er designet til at forhindre, at X-1400 Premium vælter bagover på en stejl hældning. Hvis du ser skader på hjulene, skal du stoppe med at bruge scooteren og tage den til en certificeret mekaniker, der kan sikre, at chassiset ikke er blevet beskadiget.

1.2 Sikre stigninger

X-1400 Premium kan uden fare køre op ad stigninger på op til 12° . På denne 12° stigning kan X-1400 Premium stoppe, bremse og dreje. Det er muligt at forsøge sig med stejlere stigninger, men vi anbefaler på det kraftigste, at du undlader dette. For at mindske risikoen for at vælte bagover på stigninger skal du mindske belastningen på bagsiden af scooteren ved at skubbe sædet så langt frem som muligt og læne dig fremad.



Figur 1 – Anbefalede hældninger

2 Introduktion

Din X-1400 Premium er et højteknologisk mobilitetsudstyr, der vil give dig mange års tro tjeneste og glæde. Denne manual introducerer dig til betjening, vedligeholdelse og pleje af din X-1400 Premium. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, bedes du kontakte den forhandler, hvor du oprindeligt købte din X-1400 Premium. Alt vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en autoriseret forhandler eller en certificeret mekaniker.

3 Din X-1400 Premium

3.1 Tilsigtet brug

X-1400 Premium er designet til brug på glatte fortove eller veje i overensstemmelse med lokale love. X-1400 Premium kan bruges i vådt og blæsende vejr, men der bør udvises forsigtighed, når man planlægger en tur i ugunstige vejrforhold. Hvis der står mere end 1 cm vand på fortovet, bør man være ekstra forsigtig, da scooteren kan have nedsat vejgreb og styreegenskaber. Under ingen omstændigheder må mere end én person køre på køretøjet ad gangen.

3.2 Utilsigtet bevægelse


Før påstigning skal X-1400 Premium altid være i stilstand. Når X-1400 Premium tændes, forbliver den i stilstand, indtil et af følgende sker:


1. Fremad- eller bakgearspaken trækkes.
2. Frihjulsfunktionen aktiveres.

Forsøg ikke at betjene køretøjet udefra.

Hvis køretøjet er i bevægelse, kan der udføres en nødstop ved at slippe gashåndtagene og trække kraftigt i den håndbetjente bremsearm på højre side af rorpinden.

4 Digital styrestangsguide

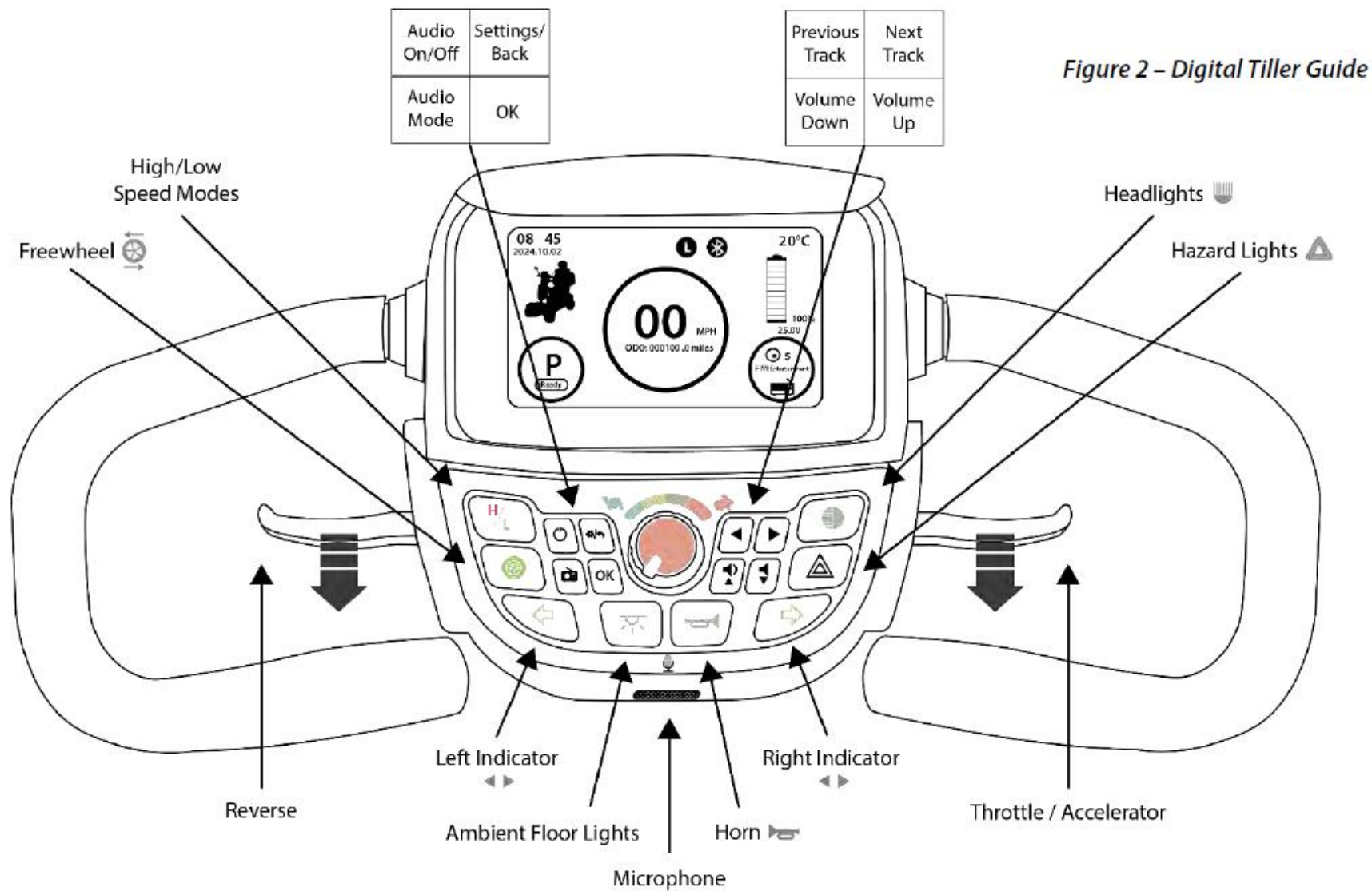

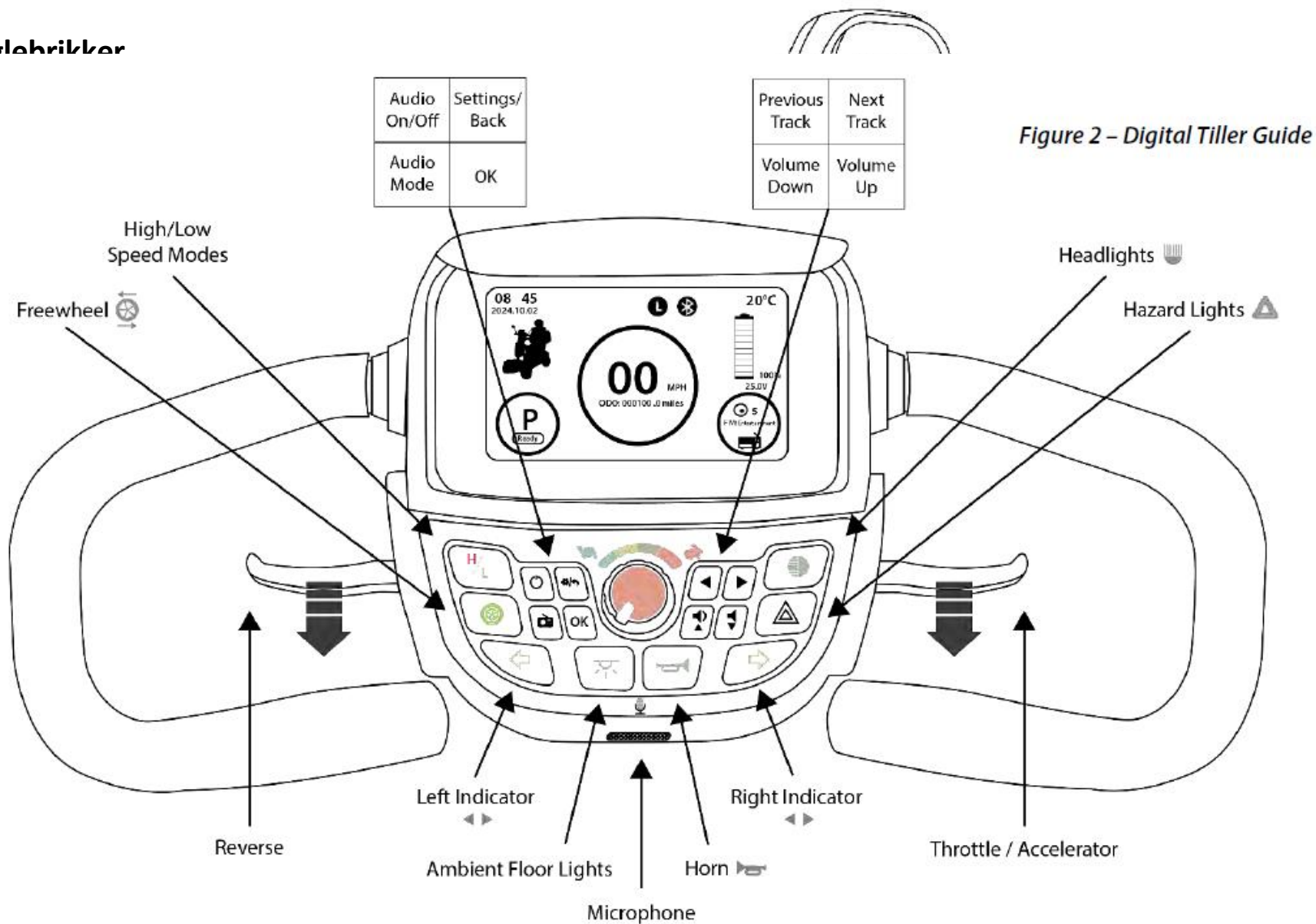

5.2 Justering af sædet

Det er vigtigt at justere sædet til en god position, så du komfortabelt kan betjene alle køretøjets kontroller.

Fremad/bagud


For at flytte sædet fremad eller bagud skal du tage fat i den sorte håndtag på højre side under sædet, mens du sidder ned.

Skub kraftigt mod gulvet med fødderne.

TOPTIP – Brug ikke styrepinden til at skubbe eller trække dig selv op.

Justering af ryglæn

Sædets hældning kan ændres ved hjælp af løftehåndtaget, der er placeret på højre side af sædet, når du sidder ned.

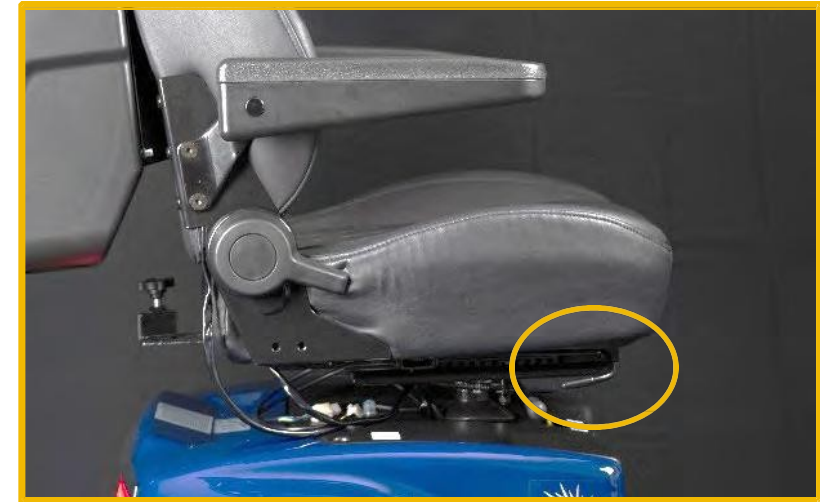

Figur 3 – Træk i den sorte håndtag for at justere sædepositionen



Figur 4 – Træk i det sorte håndtag for at justere ryglænet

Justering af drejefunktion

For at lette adgangen kan sædet drejes 90 grader.

For at ændre sædets vinkel skal du sætte dig på sædet, trække drejehåndtaget mod scooterens forende og dreje sædet mod uret.



Figur 5 – Træk i det sorte håndtag for at justere ryglænet

5.3 Justering af styret

Styrestangens vinkel kan justeres ved at trykke håndtaget ned foran på styret.

Hele rorpinden kan derefter vippe frem og tilbage for at finde en behagelig køreposition. Slip håndtaget for at fastlåse din foretrukne position.

Vær opmærksom på, at hvis rorpinden sænkes for langt, kan det gøre det vanskeligt at styre.

Prøv at finde en position, der giver et godt udsyn til det digitale kontrolpanel og mulighed for fuld bevægelse til venstre og højre.



5.4 Styring

X-1400 Premium er udstyret med en mekanisk ratstamme, der ideelt set bør betjenes med begge hænder. Når X-1400 Premium står stille, kan styringen føles lidt tung eller stiv. Styringen bliver lettere, når køretøjet er i bevægelse.

For at opnå den mest præcise styring bør X-1400 Premium køre fremad eller bagud med en kontrollerbar hastighed. Skub forsigtigt den ene side af styrepinden væk fra dig, så X-1400 Premium begynder at dreje. Sørg for, at du hele tiden holder øje med dine omgivelser under enhver manøvre.

5.5 Acceleration og bremsning

5.5.1 Hastighedskontrol

X-1400 Premium har flere metoder til hastighedskontrol: høj- og lavhastighedstilstand og maksimal hastighedsbegrænser. **5.5.1.1 Høj- og lavhastighedstilstand**

Højhastigheds- ("H") og lavhastigheds- ("L") hastighedstilstande styres med H/L-knappen.

5.5.1.2 Maksimal hastighedsbegrænser

Den røde drejeknap styrer den hastighed, du ønsker, at scooteren skal køre med, eller tilpasser din hastighed til en gående persons. Denne funktion er især nyttig, når du kører på scooteren i trange områder.

Drej drejeknappen med uret for at køre hurtigere og mod uret for at køre langsommere.



Figur 7 – H/L
hastighedsmodusstyri
ng



Figur 8 – Begrænser for
maksimal hastighed

5.5.1.3 Gashåndtag

Acceleration og deceleration styres af de røde og grønne håndtag på styret. De er designet til at forhindre, at både fremad- og bakkfunktionerne aktiveres på samme tid.

For at køre fremad skal du trække forsigtigt i det grønne håndtag. X-1400 Premium accelererer op til den maksimalt tilladte hastighed, der er indstillet med hastighedskontrolknapperne. For at sænke farten eller stoppe skal du slippe gashåndtaget, hvorefter scooteren stopper. I en nødsituation kan håndbremsen aktiveres ved at trække i bremsehåndtaget, der er placeret til højre på styret.

Bakkegearet kan aktiveres ved at trække i den røde håndtag, når scooteren står stille. For mere information om bakgear, se 5.5.3 Bakning.

5.5.2 Fritløb

Det kan være nødvendigt at flytte X-1400 Premium uden at aktivere motoren. Dette kan gøres ved at trykke på og holde knappen "Freewheel" nede. Scooteren skal være tændt, og det digitale display skal være tændt.

Tryk på og hold knappen mærket med dette symbol nede:



Slip knappen for at aktivere bremserne igen:

Af hensyn til din egen sikkerhed må denne funktion kun bruges på et plant underlag. I friløbstilstand skal du være forsigtig, når du manøvrerer scooteren, da der ikke er nogen bremsefunktion.

TOPTIP – I friløbstilstand vil scooteren fortsætte med at rulle, hvis den skubbes.

5.5.3 Bakning

For at aktivere bakning skal du sikre dig, at X-1400 Premium står stille på et jævnt underlag. Før du kører, skal du kontrollere, at området er frit for forhindringer, og at den planlagte rute er tilstrækkelig lang.

Træk forsigtigt i den røde håndtag, og X-1400 Premium begynder langsomt at køre baglæns. For at sænke farten eller stoppe skal du slippe det røde håndtag, hvorefter scooteren stopper. I en nødsituation kan håndbremsen aktiveres ved at trække i bremsehåndtaget, der er placeret til højre på styret.

5.6 Start af X-1400 Premium

X-1400 Premium kan startes, når nøglefri fjernbetjeningen er i nærheden af scooteren, og start-/stopknappen trykkes ned (figur 9).

X-1400 Premium er tændt og klar til brug, når velkomstskræmen vises, og den digitale farveskærm viser visuelle data (figur 10).




Figur 9 – Start/stop-knap



Figur 10 – Digitalt instrumentbræt, der viser data

5.7 Digitalt farvedisplay

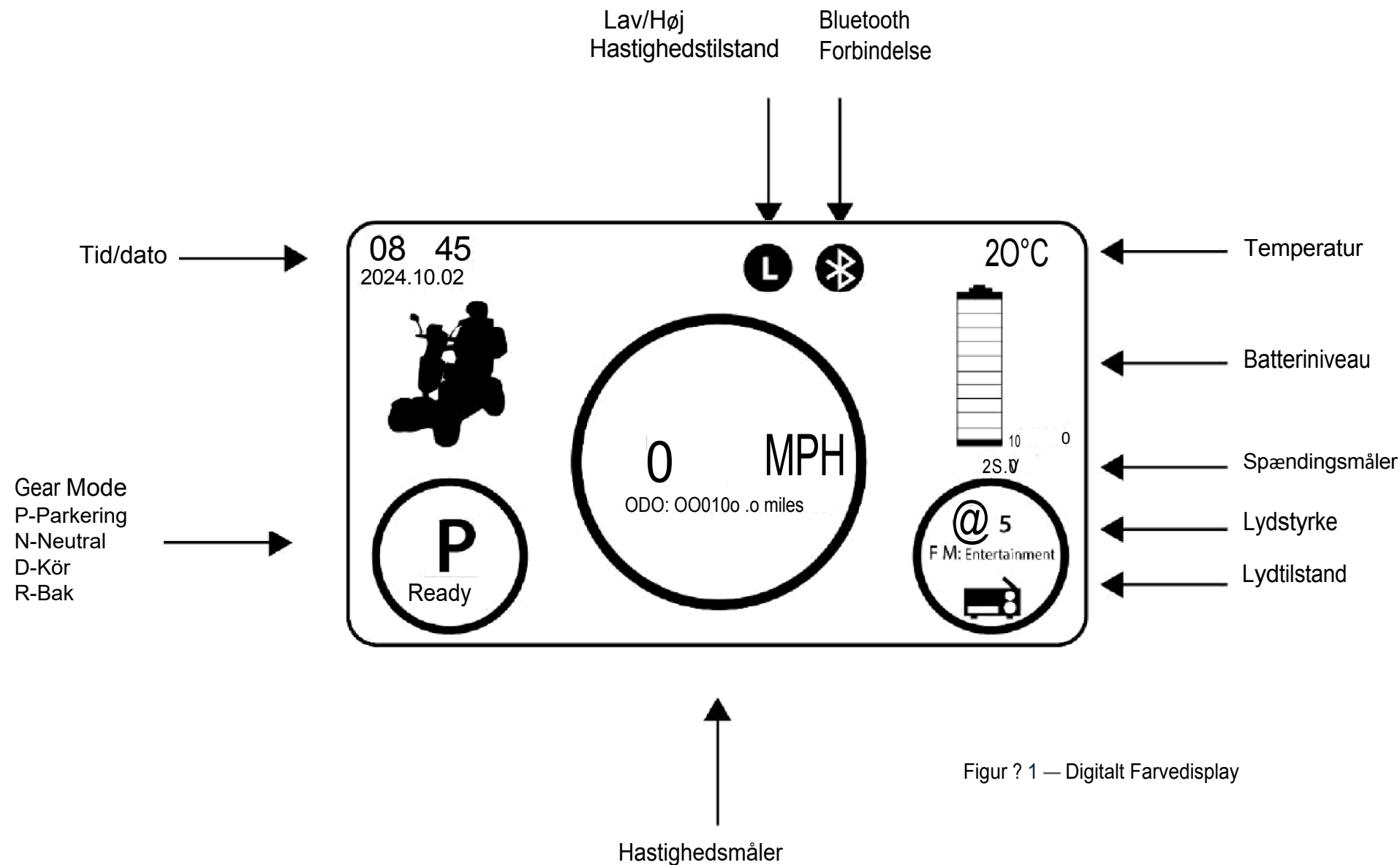

Figur ? 1 — Digitalt Farvedisplay

5.7.1 Kilometertæller

De viste kilometer på det digitale farvedisplay er kumulative og repræsenterer den samlede afstand, som scooteren har tilbagelagt.

5.7.2 Indstilling af dato og klokkeslæt

Følg nedenstående instruktioner for at indstille uret:

1. Hold knappen Indstillinger/Tilbage nede i tre sekunder.
2. Tryk på ned-knappen  og fremhæv 'System', tryk på OK-knappen.
3. Tryk på ned-knappen  og fremhæv 'Lokal indstilling', tryk to gange på OK-knappen.
4. Tryk på ned-knappen  og fremhæv "Tid og dato", tryk på OK-knappen.
5. Brug ned-knappen  til at vælge enten År, Måned, Dag, Time eller Minut, tryk på OK-knappen
6. Brug op- og ned-knapperne  til at justere indstillingen.
7. Tryk på OK-knappen   for at bekræfte indstillingen.
8. Gentag om nødvendigt trin 5-7 for at justere år, måned, dag, time eller minut.
9. Tryk på knappen Indstillinger/Tilbage for at vende tilbage til hovedskærmens interface.
10. Dato og klokkeslæt vil nu blive indstillet.

5.8 Indikatorer

Blinklysene er lyse LED'er, der er nemme at se, og som er orangefarvede.

For at tænde dem skal du trykke én gang på enten venstre  eller højre  knap, inden du påbegynder en manøvre. Når svinget er afsluttet, og det er sikkert at gøre det, skal du trykke på indikatorknappen igen for at slukke indikatoren.

5.9 Advarselsblink

I en nødsituation kan begge indikatorer aktiveres på samme tid ved at trykke på  knappen. Dette får både venstre og højre blinklys til at blinke foran og bagpå, indtil knappen trykkes ned igen.

5.10 Horn


Det elektriske horn aktiveres ved at trykke på knappen "" på styret. Hornet må kun bruges i overensstemmelse med færdselsloven. Hornet lyder kun, hvis scooteren er tændt.

5.11 Bluetooth


X-1400 Premium har integreret Bluetooth-forbindelse og to højttalere indbygget i styret. Mobile enheder kan

parres med scooteren for at afspille musik og lyd:

1. Tænd scooteren og din mobilenheds Bluetooth
2. Naviger til din mobilenheds Bluetooth-indstillinger
3. Vælg enheden med navnet 'scooter' (se figur 13)
4. Indtast pinkoden '0000' og opret forbindelse
5. Når der er oprettet forbindelse, vises Bluetooth-ikonet på skærmen (se figur 12).
6. For at afspille lyd skal du gå til din mobilenheds lydapp og trykke på Afspil
7. Juster lydstyrken ved hjælp af knapperne Lydstyrke op/Lydstyrke ned (se figur 2).
8. Spring til næste eller forrige spor ved at trykke på venstre og højre knapper

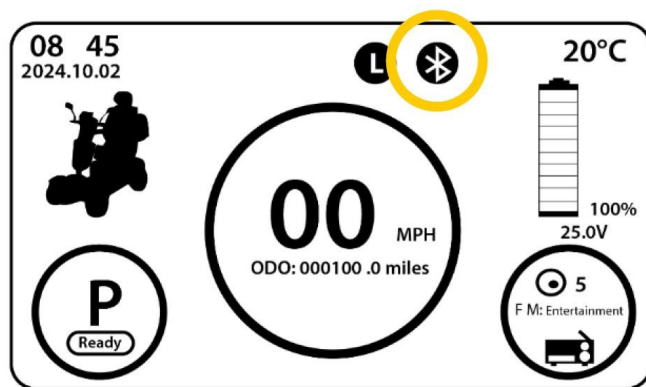

Figur 12 – Bluetooth-forbindelse aktiv

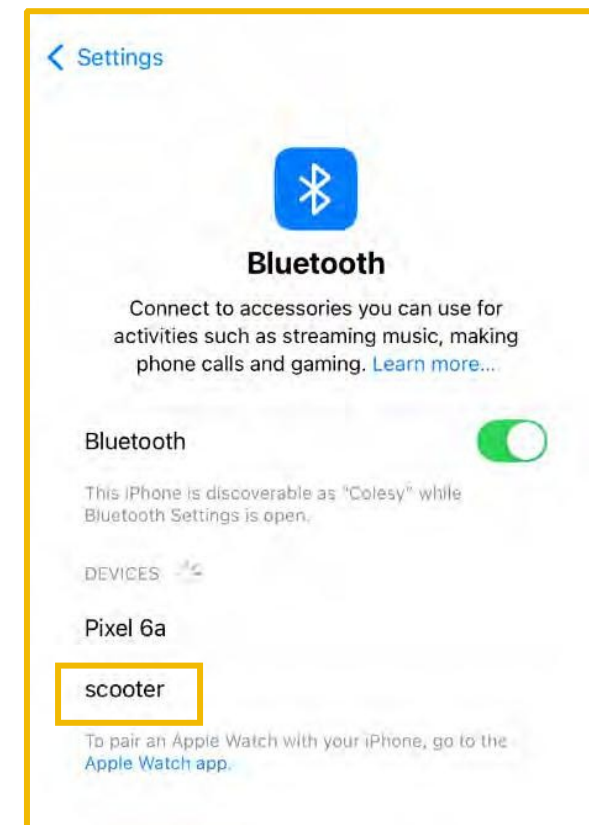

Figur 13 – Bluetooth-telefonindstillinger

5.12 Skærmdeling

X-950 Digital Colour Display kan spejle skærmen fra din mobile enhed (Android eller iOS). Følg nedenstående

instruktioner for at spejle skærmen fra din mobiltelefon:

1. Tænd for X-950 og tilslut din mobiltelefon til scooteren via Bluetooth (se 5.11)
2. Download EYLINK-appen fra din mobiltelefons App Store (se figur 14).
3. Åbn EYLINK-appen og 'Log ind med Apple' eller 'Log ind med Google'.
4. Giv appen adgang til alle de ønskede tilladelser: Placering, medier, mikrofon, Bluetooth og meddelelser.
5. Vælg enheden fra listen, der begynder med 'EDG', eller tryk på 'Opret forbindelse til Dashboard'.
6. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte dig Wi-Fi-netværket 'iteAP' og vente på, at forbindelsen oprettes.
7. Tryk på 'Screen Mirroring', tryk på 'Start Screen Mirroring' og tryk på 'Start Broadcast'.
8. Mobiltelefonens skærm spejles på scooterens digitale farvedisplay.
9. Åbn den mobilapp, du vil se, f.eks. Audio Player eller Navigation.
10. Hvis du vipper din telefon til liggende format, vil det digitale farvedisplay også blive vist i liggende format.
11. Indsæt din mobiltelefon med skærmen nedad i scooterens mobiltelefonholder

TOPTIP – Sæt din telefon med skærmen nedad i holderen.


Hvis du indsætter den med den rigtige side opad, roteres det digitale farvedisplay til stående format.

Følg nedenstående instruktioner for at stoppe spejling af skærmen fra din mobiltelefon:

1. Gå til EYLINK-appen og tryk på 'Afslut skærmspejling'.
2. Det digitale farvedisplay skifter tilbage til betjeningskærmen.



Figur 14 – EYLINK-app-ikon

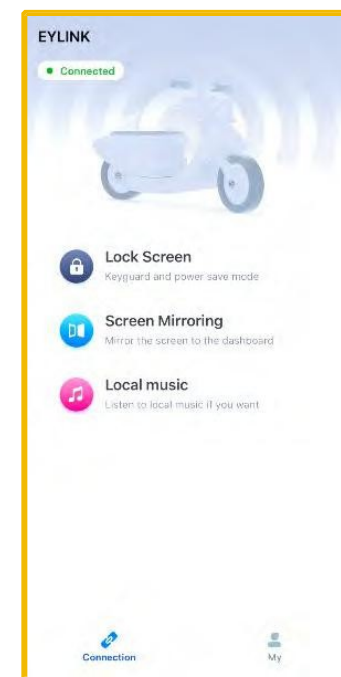

Figur 15 – EYLINK-appen

5.14 USB-opladningsporte


X-1400 Premium er udstyret med USB-opladningsporte på højre side af rattet. **Port 1** er placeret ved siden af LED-lyset, og **port 2** findes på højre side.

USB-port 1: Kun dataport

Denne port kan bruges til afspilning af lydfiler fra USB-drev.

USB-port 2: Kun opladningsport

Denne port kan bruges til at oplade mobiltelefoner og tablets.

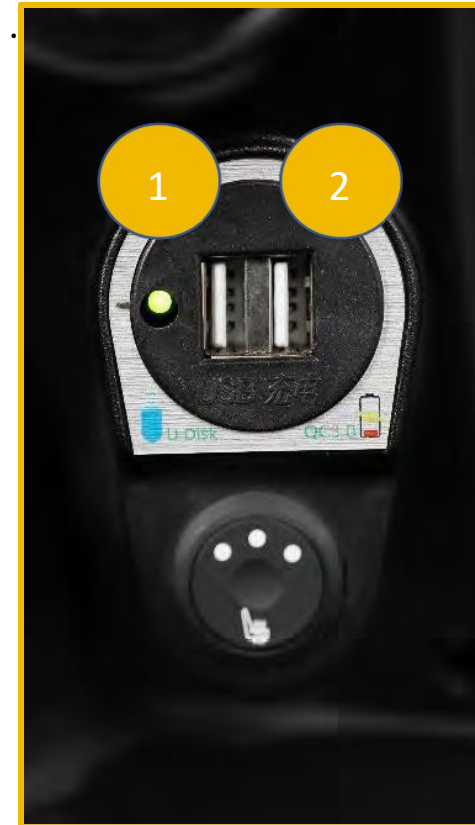

Figur 16 – USB-opladningsporte

5.15 Flaske- og mobiltelefonholder

For din bekvemmelighed er X-1400 Premium udstyret med to plaststøbte holdere. Brug disse til at opbevare flasker med drikkevarer og din mobiltelefon på en sikker måde.

TOPTIP – Flaskeholderen må ikke bruges til opbevaring af alkoholholdige drikkevarer.



Figur 17 – Kop- og mobiltelefonholder monteret på rorpinden

5.16 Taskeholder

Der er en praktisk taskeholder integreret i scooterens styrestang. Denne holder kan bruges til at opbevare din personlige taske eller indkøb.

For at få adgang til klipsen skal du trykke på bunden af holderen, så klipsen skubbes mod dig. Posestativet kan bære en **maksimal vægt på 2,5 kg**.



Figur 18 – Taskeholder

5.17 Opladningsport

Opladning af X-1400 Premium kan udføres ved hjælp af opladningsporten på styret.

Porten er placeret på styrstammen på højre side. For at oplade køretøjet skal du blot tilslutte det medfølgende opladerkabel til porten.

Når X-1400 Premium er i opladningstilstand, går den ikke i kørselstilstand.

TOPTIP – For at opnå den bedste ydeevne skal du sørge for at oplade batterierne efter hver brug. Du kan ikke overoplade dem, da opladeren automatisk slukker, når den registrerer, at de er fuldt opladede.

Hvis du ikke bruger din scooter i længere perioder, anbefaler vi, at batterierne oplades mindst en gang om ugen.

Dette sikrer, at de forbliver i god stand og er klar til regelmæssig brug.



Figur 19 – Ladeport monteret på styret

5.18 Opvarmet sæde

For at aktivere funktionen til opvarmet sæde skal du bruge knappen til opvarmet sæde, der er placeret under betjeningsknapperne og hovedstyret. Der er tre varmeindstillinger: Lav, Medium og Høj.

Fra



Til



Når knap-LED'erne ikke lyser, betyder det, at sædevarmen er slukket.

Når knappen lyser, betyder det, at sædevarmen er tændt.

3 røde LED'er = Høj

2 røde LED'er =

Medium 1 rød LED =

Lav



Figur 20 – Knap til sædevarme

6 Vedligeholdelse

6.1 Udskiftning af pærer

LED-pærer er energieffektive og holdbare, men de kan med tiden blive nødt til at udskiftes. LED-pærer kan købes hos den forhandler, der har leveret din X-1400 Premium. Udskiftning af pærer må kun udføres af en autoriseret forhandler, da det indebærer adskillelse af enheder, der skal forsegles igen i henhold til de oprindelige produktionsspecifikationer.

6.2 Batteripleje

For at få adgang til batterierne skal sædet fjernes. Før sædet fjernes, skal begge tilslutninger til det opvarmede sæde afbrydes. For at fjerne sædet skal du tage fat i den sorte håndtag på højre side under sædet og trække det mod forenden af køretøjet. Sædet kan derefter fjernes ved at trække det direkte opad.

Batterierne i din X-1400 Premium kræver ikke daglig vedligeholdelse, men det kan være nødvendigt at få adgang til dem. Batterierne er placeret under sædet og beskyttet af en sort plastikafskærmning, der er fastgjort med seks skruer.


Når vedligeholdelsen er afsluttet, skal du sikre dig, at skruerne bruges til at fastgøre batteridækslet igen. Sæt sædet på plads igen, og sørg for, at det er låst fast.

6.3 Sikringer

Sikringerne på X-1400 Premium er tilgængelige gennem en afdækket luge foran på rorpinden. For at få adgang til sikringspanelet skal du blot trække fastgørelsesklipsen ned og skubbe dækslet af. Sikringer må kun udskiftes af fagfolk, da forkert udført arbejde kan beskadige det elektriske system.



Figur 21 – Placering af sikringsboks

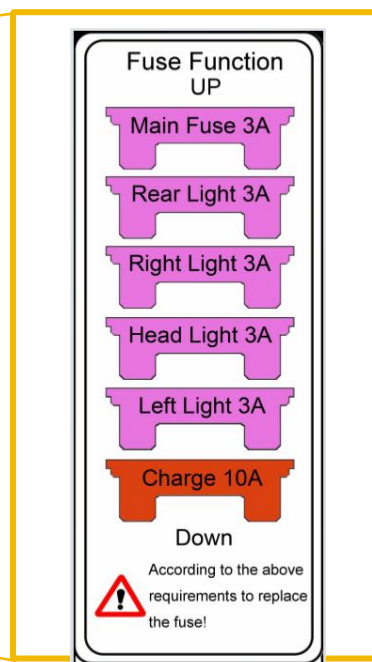

Figur 22 – Dæksel til sikringsboks

6.4 Dæktryk

Dækkene på X-1400 Premium er designet til at give en god balance mellem komfort og energieffektivitet. Forkert oppumpede dæk kan føre til dårlig håndtering, reduceret rækkevidde og øget slid. Dækkene skal altid have mindst 3 mm mønsterdybde for at give tilstrækkeligt vejgreb. Hvis dækkene bliver slidte, skal de udskiftes, inden X-1400 Premium bruges igen.

Dæktryk foran: 35 psi Dæktryk

bag: 35 psi

6.5 Rengøring og vedligeholdelse

6.5.1 Gummimåtter

Gummimåtten skal rengøres med en støvsuger med en møbelbørste påsat. Til pletter kan der bruges en mild blanding af møbel sæbe og vand, og området skal tørres grundigt efterfølgende.

TOPTIP – Brug ikke blegemiddel.

6.5.2 Lak

For at pleje lakken skal X-1400 Premium regelmæssigt vaskes med bløde klude og et mildt bilrengøringsmiddel. Påfør bilpolish for at opnå en højglansfinish. Det anbefales stærkt at påføre polish på områder, hvor lakken kan blive udsat for ugunstige vejrforhold.

TOPTIP – Brug aldrig kogende vand til at rengøre X-1400 Premium.

7 Garanti

X-1400 Premium leveres med 12 måneders producentgaranti, når den købes ny hos en autoriseret forhandler. I garantiperioden reparerer alle dele, der bliver defekte på grund af fejl i håndværk eller materialer, af den forhandler, hvor den er købt. Hvis en reparation ikke kan udføres, monteres en erstatningsdel monteret.

Hvis der konstateres en fabrikationsfejl, skal dette rapporteres skriftligt til den forhandler, hvor X-1400 Premium blev købt, inden for 28 dage efter købet.

Dele, der anses for at have en begrænset levetid, herunder batterier og dæk, er ikke dækket, hvis de anses for at have været udsat for overdreven slitage eller misbrug.

Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert brug af produktet, eftermonterede ændringer eller utilsigtede skader. Garantien kan ikke overdrages.

Garantien dækker ikke følgeomkostninger som følge af fejlfinding, fragt- og rejseomkostninger, tabt indtjening, udgifter osv.

Producenten påtager sig ikke ansvaret for skader eller personskader, der skyldes forkert brug eller manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugervejledning.

8. Specifikationer

8.1 Tekniske specifikationer

Motor	Baghjulstræk, forseglet transaksel, 1400 W, 24 volt DC	Batterier	Dobbelt 12 V 75 Ah eller 110 Ah
Dashboard	Digitalt farvedisplay 16-knaps rorpind Maksimal hastighed	Dæk	Pneumatiske

10.2 Størrelser og vægt

Længde	1660-1800 mm
Bredde	800 mm
Højde	1450 mm
Motoreffekt	1400 W
Controller	PG200A
Bremser	Elektromagnetisk/hydraulisk
Vægt	130 kg (uden batterier)
Vægtpacitet	240 kg
Frihøjde	110 mm (uden last)
Forhjul	14" luftdæk
Baghjul	16" luftdæk
Maksimal stigning	12 grader
Drejeradius	1800 mm

1 Internationale hastigheder: Tilgængelig afhængigt af jurisdiktion og lokal lovgivning.

2 Rækkevidden kan variere afhængigt af batteriets opladning/tilstand/valgmuligheder, terræntype, dæktilstand og køretøjets belastning.

3 På grund af produktionstolerancer og løbende produktforbedringer kan denne specifikation variere med +/-3 %.

4 Varierer afhængigt af brugerens vægt, terræn, batteriopladning, batteriets tilstand og dækkenes tilstand.