

# BLIMO

## KÄYTTÖOHJE - BLIMO X-950



# 1 Turvallisuus

R7SM-PRO-laitetta saa käyttää vain yksi henkilö, jolla ei ole näkö-, kuulo- tai reagoimiskykyä heikentäviä sairauksia. Jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista, suosittelemme, että kysyt lääkäriltäsi neuvoa ennen X-950-laitteen käyttöä.


- Aja esteiden yli ja reunakivien päälle vain niiden matalimmassa kohdassa ja suorassa kulmassa.
- Äkillisiä käännöksiä tai nopeuden muutoksia ei suositella.
- Vältä jyrkkiä pintoja, jos on olemassa luistamisen vaara jäisten tai märkien pintojen vuoksi.
- Vältä ajamista irtonaisilla pinnoilla, kuten soralla.
- Aja aina suoraan ylämäkeen, älä zigzag-liikkein.
- Älä käännä X-950-mallia kaltevilla pinnoilla.
- Älä aja X-950:llä portaita alas.
- Aja aina eteenpäin alamäkiä, reunakiveyksiä ja muita esteitä alas.

## 1.1 Kaatumisenestopyörät

X-950 on varustettu takana kaatumisenestopyörillä. Nämä ovat hätätilanteiden varajärjestelmä, johon ei pidä koskaan luottaa normaalikäytössä. Ne on suunniteltu estämään X-950:n kaatuminen taaksepäin jyrkissä rinteissä. Jos huomaat pyörissä vaurioita, lopeta skootterin käyttö ja vie se sertifioidulle mekaanikolle, joka voi varmistaa, että alusta ei ole vaurioitunut.

## 1.2 Turvalliset rinteet

X-950 voi kiivetä jopa 12 asteen kaltevuuden nousuja vaaratta. Tällä 12 asteen kaltevuudella X voi pysähtyä, jarruttaa ja kääntyä. Jyrkempiä nousuja on mahdollista yrittää, mutta suosittelemme vahvasti, että et tee niin. Vähennä skootterin takapään kuormitusta liu'uttamalla istuinta mahdollisimman paljon eteenpäin ja nojaamalla eteenpäin, jotta skootteri ei kaadu taaksepäin nousuissa.

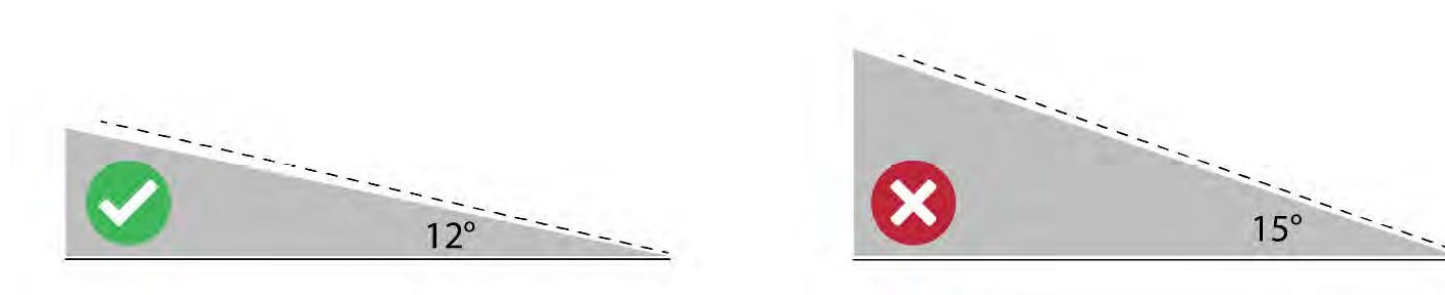

Kuva 1 – Suositellut kaltevuudet

## 2 Johdanto

X-950 on korkean teknologian liikuntaväline, joka palvelee sinua uskollisesti ja tarjoaa iloa vuosien ajan. Tämä käyttöohje esittelee X-950:n käytön, huollon ja hoidon. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin asiasta, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut X-950:n. Kaikki huoltotyöt tulee suorittaa joko valtuutettu jälleenmyyjä tai sertifioitu mekaanikko.

## **3 X-950**

### **3.1 Käyttötarkoitus**

X-950 on suunniteltu käytettäväksi tasaisella päällysteellä tai tiellä paikallisten lakien mukaisesti. X-950:tä voidaan käyttää märällä ja tuulisella säällä, mutta huonoissa sääolosuhteissa matkaa suunniteltaessa on käytettävä harkintaa. Jos päällysteellä on yli 1 cm vettä, on oltava erityisen varovainen, koska skootterin pito ja ohjattavuus voivat heikentyä. Missään tapauksessa useampi kuin yksi henkilö ei saa käyttää ajoneuvoa samanaikaisesti.

### **3.2 Tahaton liike**


Ennen nousua X-950:n tulee aina olla paikallaan. Kun X-950 kytketään päälle, se pysyy paikallaan, kunnes jokin seuraavista tapahtuu:

1. Eteen- tai taaksepäin-vipu vedetään.
2. Vapaakäyntitoiminto kytketään päälle.

Älä yritä käyttää ajoneuvoa sen ulkopuolelta.

Jos ajoneuvo on liikkeessä, hätäpysäytys voidaan suorittaa vapauttamalla kaasuvivut ja vetämällä voimakkaasti käsikäyttöistä jarruvipua ohjauskahvan oikealla puolella.

## 4 Digitaalinen ohjauskahvan opas

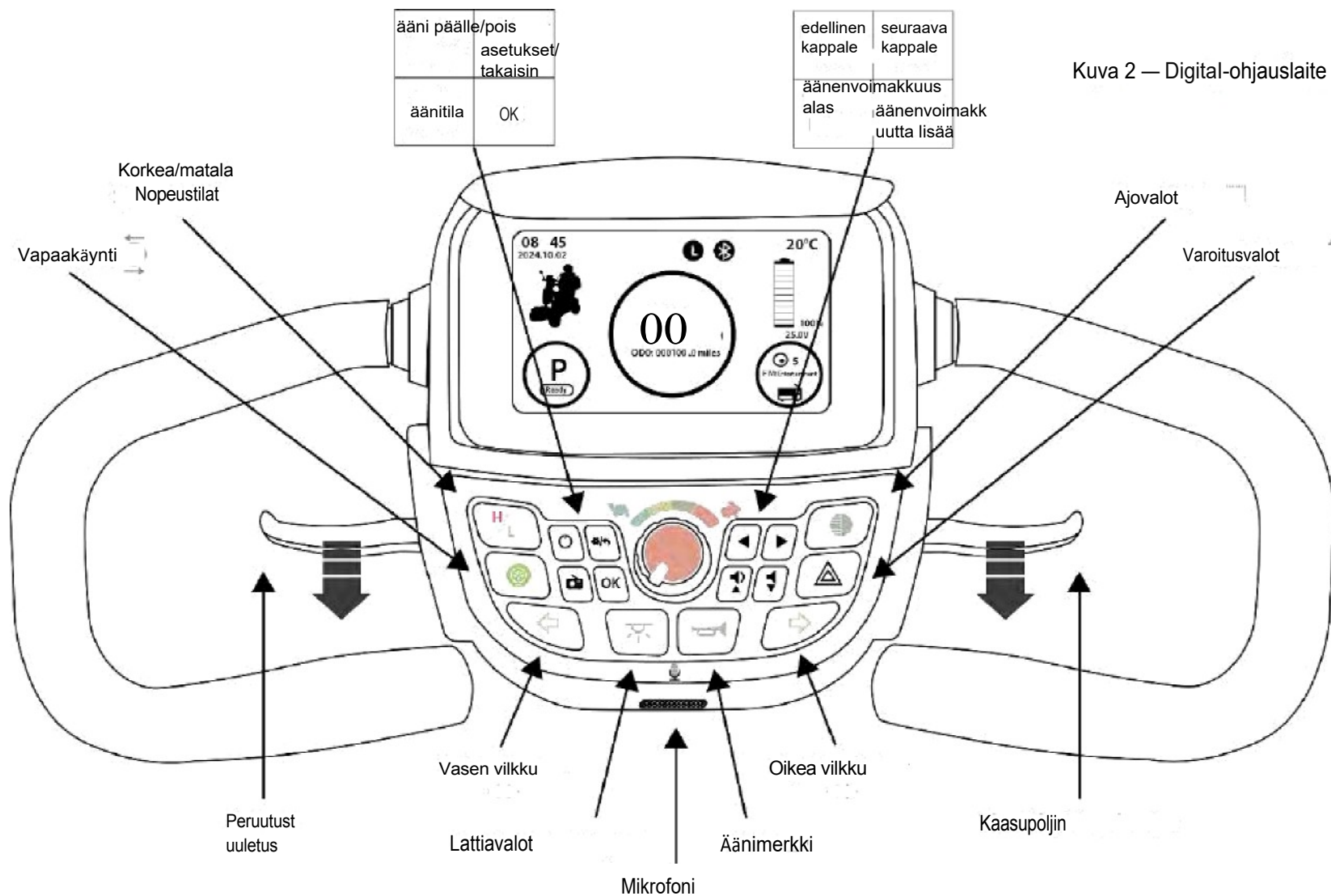

## 5 X-950:n käyttö


### 5.1 Avaimet ja avainperät

X-950-mallin mukana toimitetaan kaksi avaimetonta kauko-ohjainta:



Avaimet toimivat 10 metrin säteellä skootterista.

#### Avaimeton avain x2

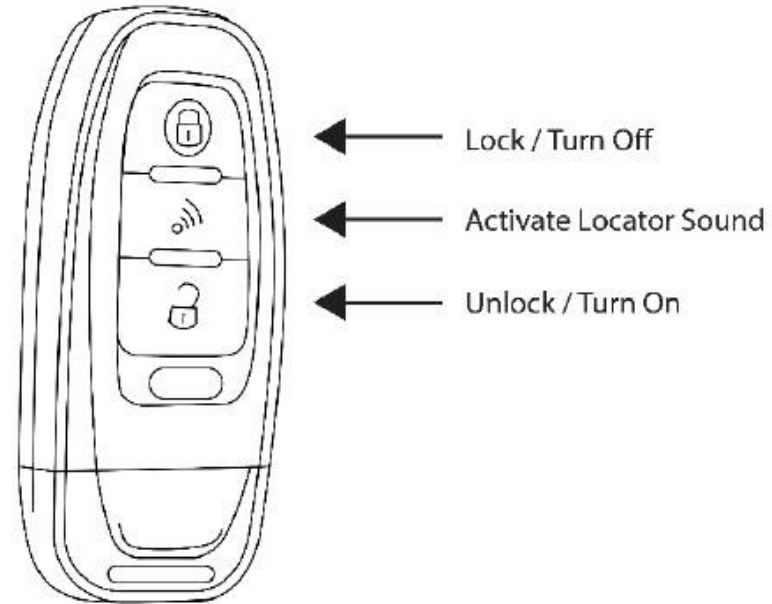

#### Virran kytkeminen

Käynnistä X-950 istumalla kuljettajan istuimelle ja painamalla joko avaimenperän "Unlock / Turn On" -painiketta tai ohjauspylvään "Start/Stop" -painiketta.

#### Virran katkaiseminen

Skootterin sammuttamiseksi paina avaimenperän "Lukitse/Sammuta"-painiketta tai ohjauspylvään "Käynnistä/Pysäytä"-painiketta.

#### Paikannusääni

Jos avaimeton kaukosäädin on kantaman sisällä, voit käyttää tätä toimintoa skootterin paikantamiseen vilkkaassa ympäristössä. Painamalla paikannusääntä-painiketta aktivoit voimakkaan äänimerkin.

## 5.2 Istuimen säätö

On tärkeää säätää istuin hyvään asentoon, jotta voit käyttää kaikkia ajoneuvon hallintalaitteita mukavasti.

### Eteenpäin/taaksepäin


Voit siirtää istuinta eteen- tai taaksepäin tarttumalla istuimen alla oikealla puolella olevaan mustaan vipuun istuessasi.

Työnnä jaloillasi voimakkaasti lattiaa vasten.


**TÄRKEÄ VINKKI – Älä käytä ohjauskahvaa työntämään tai vetämään itseäsi ylös.**

### Selkänojan säätö

Istuimen kallistusta voidaan muuttaa istuimen oikealla puolella istuessa olevalla nostovivulla.

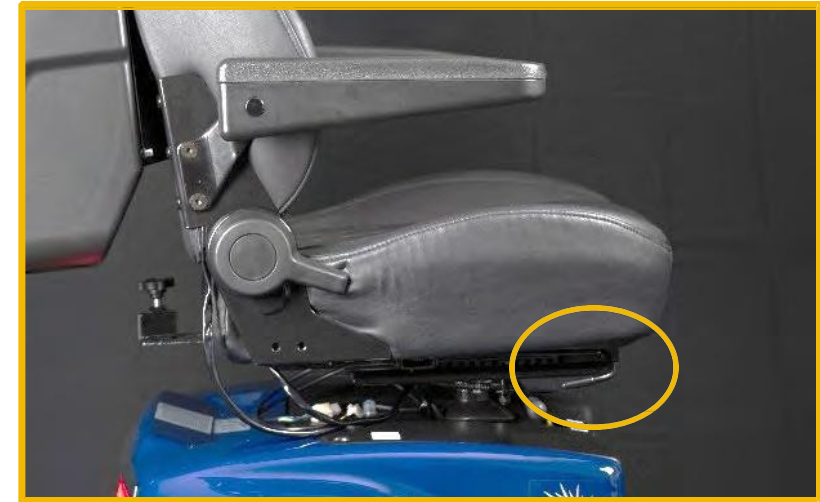

**Kuva 3 – Vedä mustasta vivusta  
säätääksesi istuimen asentoa**

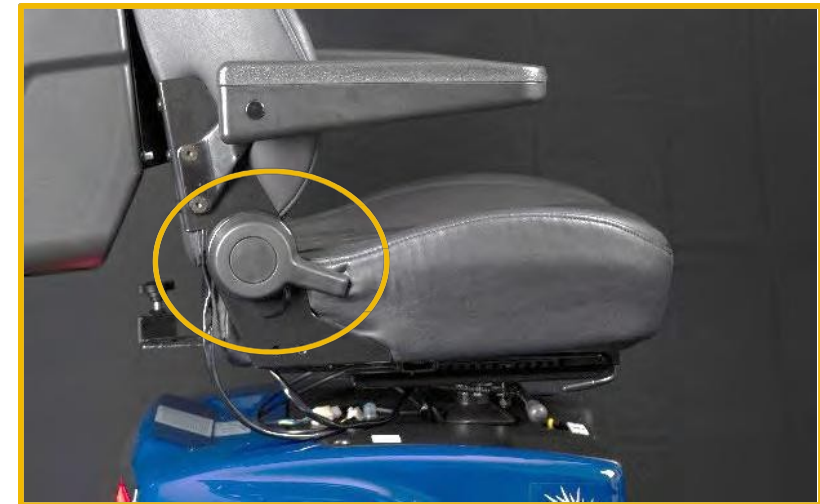

**Kuva 4 – Säädä selkänojaa vetämällä  
mustasta kahvasta**

## Kääntöasennon säätö

Helppokäyttöisyyden takaamiseksi istuin voidaan kääntää 90 asteen kulmaan.

Istuimen kulmaa voi muuttaa istumalla istuimelle, vetämällä kääntökahvasta skootterin etuosaa kohti ja kääntämällä istuinta vastapäivään.



**Kuva 5 – Vedä mustasta kahvasta säätääksesi selkänojaa**

## 5.3 Ohjaustangon säätö

Ohjaustangon kulmaa voidaan säätää painamalla ohjaustangon etuosassa olevaa vipua alaspäin.

Koko ohjauskahva voi sitten kallistua eteen- ja taaksepäin, jotta löydät mukavan ajoasennon. Vapauta vipu varmistaaksesi haluamasi asennon.

Huomaa, että ohjauskahvan liian suuri laskeminen voi vaikeuttaa ohjausta.

Yritä löytää asento, josta digitaalinen ohjauspaneeli on hyvin näkyvissä ja ohjaus voidaan kääntää täysin vasemmalle ja oikealle.



## 5.4 Ohjaus

X-950 on varustettu mekaanisella ohjauspylväällä, jota tulisi käyttää mieluiten molemmilla käsillä. Kun X-950 on paikallaan, ohjaus voi tuntua hieman raskaalta tai jäykältä. Ohjaus kevenee, kun ajoneuvo on liikkeessä.

Tarkimman ohjauksen saavuttamiseksi X-950:n tulisi liikkua eteen- tai taaksepäin hallittavalla nopeudella. Työnnä ohjauskahvan toista puolta varovasti poispäin itsestäsi, jolloin X-950 alkaa kääntyä. Varmista, että tarkkailet jatkuvasti ympäristöäsi kaikissa liikkeissä.

## 5.5 Kiihtyvyys ja jarrutus

### 5.5.1 Nopeuden säätö

X-950-mallissa on useita nopeuden säätötapoja: korkea ja matala nopeustila sekä maksiminopeuden rajoitin.

#### 5.5.1.1 Nopea ja hidas nopeustila

Korkea nopeus (H) ja matala nopeus (L) säädetään H/L-painikkeella.

#### 5.5.1.2 Maksiminopeuden rajoitin

Punaisella säätimellä säädetään skootterin ajonopeutta tai sovitetaan nopeus kävelevän henkilön nopeuteen. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen, kun skootteria käytetään ahtaissa tiloissa.

Käännä valitsinta myötäpäivään, jos haluat ajaa nopeammin, ja vastapäivään, jos haluat ajaa hitaammin.



Kuva 7 – H/L-  
nopeuden säätö



Kuva 8 –  
Maksiminopeuden  
rajoitin

### 5.5.1.3 Kaasuvivut

Kiihtyvyyttä ja hidastuvuutta ohjataan ohjaustangon punaisella ja vihreällä vivulla. Ne on suunniteltu estämään eteen- ja taaksepäinajon samanaikainen aktivointi.

Ajaaksesi eteenpäin, vedä varovasti vihreää vipua. X-950 kiihtyy nopeudensäätimillä asetettuun suurimpaan sallittuun nopeuteen. Hidastaaksesi tai pysähtyäksesi, vapauta kaasuvipu ja skootteri pysähtyy. Häätätilanteessa käsijarru voidaan kytkeä vetämällä ohjaustangon oikealla puolella sijaitsevasta jarrukahvasta.

Peruutusvaihte voidaan kytkeä vetämällä punaisesta vivusta, kun skootteri on pysähdyksissä. Lisätietoja peruutusvaihteesta on kohdassa 5.5.3 Peruutus.

### 5.5.2 Vapaakäyntitila

Saatat joutua siirtämään X-950:tä ilman moottoria. Tämä voidaan tehdä painamalla ja pitämällä painettuna ”Vapaakäynti”-painiketta. Skootterin on oltava päällä ja digitaalinäytön valaistuna.

Paina ja pidä painettuna painiketta, jossa on tämä symboli:



Vapauta painike, jotta jarrut kytkeytyvät uudelleen:

Oman turvallisuutesi vuoksi käytä tätä toimintoa vain tasaisella alustalla. Vapaakäyntitilassa on oltava varovainen skootterin ohjaamisessa, koska jarruja ei ole.

**TÄRKEÄ VINKKI – Vapaakäyntitilassa skootteri jatkaa liikkumistaan, jos sitä työnnetään.**

### 5.5.3 Peruuttaminen

Varmista, että X-950 on paikallaan ja tasaisella alustalla, ennen kuin kytket peruutusvaihteen. Ennen liikkeellelähtöä tarkista, että alueella ei ole esteitä ja että suunniteltu reitti on riittävän leveä.

Vedä varovasti punaisesta vivusta, niin X-950 alkaa liikkua hitaasti taaksepäin. Hidastaaksesi tai pysäyttääksesi, vapauta punainen vipu, niin skootteri pysähtyy. Häätätilanteessa käsijarru voidaan kytkeä vetämällä ohjaustangon oikealla puolella olevasta jarrukahvasta.

## 5.6 X-950:n käynnistäminen

X-950 voidaan käynnistää, kun avaimeton kauko-ohjain on skootterin lähellä ja Start/Stop-painiketta painetaan (kuva 9).

X-950 on käynnistynyt ja käyttövalmis, kun tervetulonäyttö on näkynyt ja digitaalinen värinäyttö näyttää visuaalisia tietoja (kuva 10).




**Kuva 9 – Käynnistys-/pysäytyspainike**



**Kuva 10 – Digitaalinen kojelauta, joka näyttää tietoja**

# 5.7 Digitaalinen värinäyttö

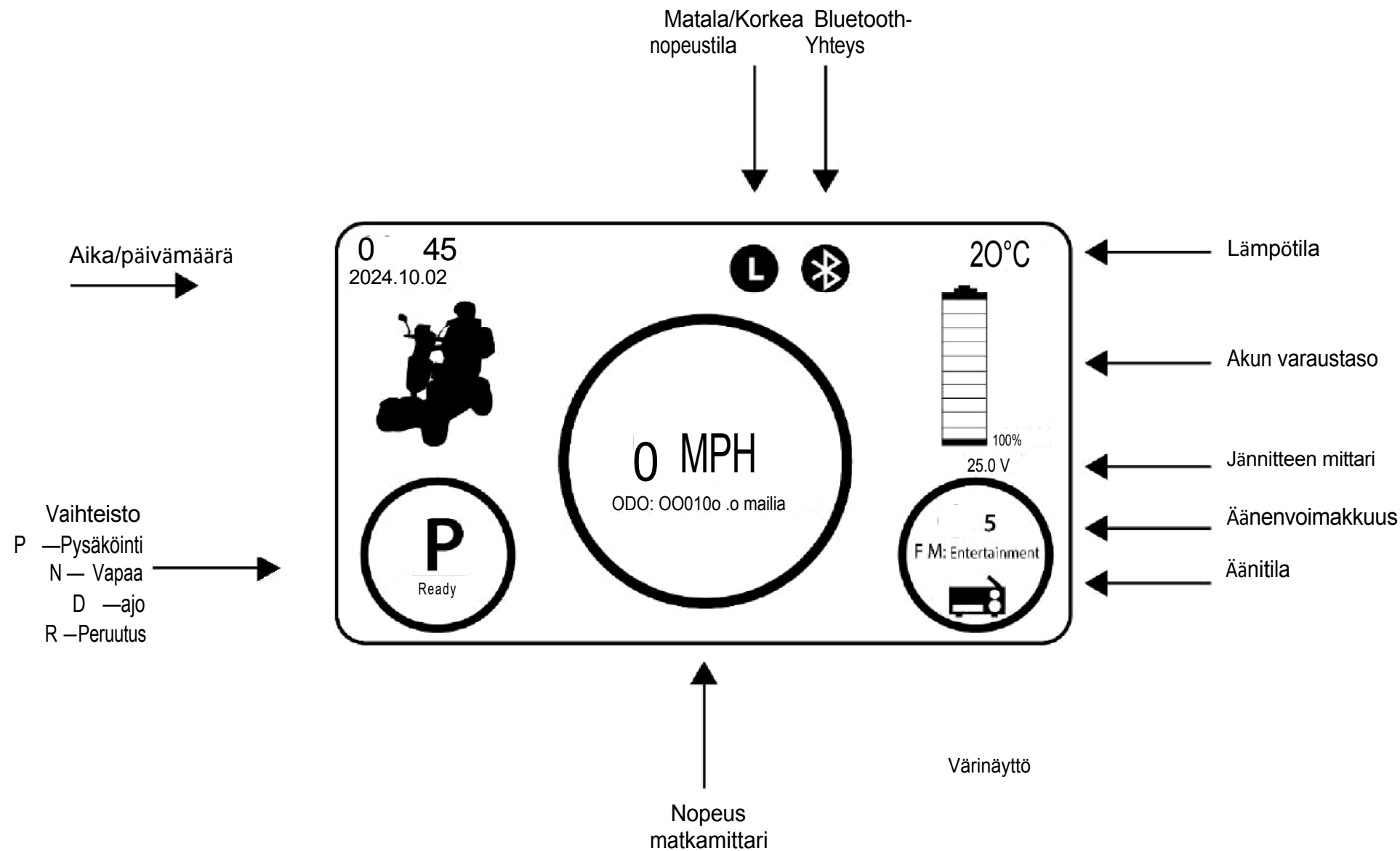

## 5.7.1 Matkamittari

Digitaalisessa värinäytössä näkyvät mailit ovat kumulatiivisia ja edustavat skootterin kulkemaa kokonaismatkaa.

## 5.7.2 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Aseta kello seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Paina ja pidä asetukset/takaisin-painiketta painettuna kolme sekuntia.
2. Paina alas-painiketta  ja korosta ”Järjestelmä”, paina OK-painiketta.
3. Paina alaspäin-painiketta  ja korosta "Paikalliset asetukset", paina OK-painiketta kahdesti.
4. Paina alaspäin-painiketta  ja korosta "Aika ja päivämäärä", paina OK-painiketta.
5. Käytä alas-painiketta  valitse joko Vuosi, Kuukausi, Päivä, Tunti tai Minuutti, paina OK-painiketta
6. Käytä painikkeita  säätääksesi asetusta.
7. Paina OK-painiketta   vahvistaaksesi asetuksen.
8. Toista tarvittaessa vaiheet 5–7 vuoden, kuukauden, päivän, tunnin tai minuutin säätämiseksi.
9. Paina Asetukset/Takaisin-painiketta palataksesi päänäyttöön.
10. Päiväys ja kellonaika on nyt asetettu.

## 5.8 Ilmaisimet

Ilmaisimet ovat kirkkaita, helposti näkyviä oransseja LED-valoja.

Kytke ne päälle painamalla joko vasenta  tai oikeaa  painiketta kerran ennen liikkeen aloittamista. Kun käännös on suoritettu ja se on turvallista, paina vilkkupainiketta uudelleen vilkun sammuttamiseksi.

## 5.9 Varoitusvalot

Hätätilanteessa molemmat vilkut voidaan kytkeä päälle samanaikaisesti painamalla



painiketta. Tällöin sekä vasen että oikea vilkku vilkkuvat edessä ja takana, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

## 5.10 Äänimerkki

Sähköinen äänimerkki aktivoidaan painamalla ohjauskahvan yläosassa olevaa



-painiketta. Äänimerkkiä saa käyttää vain liikennesääntöjen mukaisesti. Äänimerkki soi vain, jos skootteri on käynnissä.

## 5.11 Bluetooth


X-950-mallissa on integroitu Bluetooth-yhteys ja kaksi kaiutinta, jotka on rakennettu ohjauspylvääseen. Mobiililaitteet

voidaan yhdistää skootteriin musiikin ja äänen toistamista varten:

1. Käynnistä skootteri ja mobiililaitteesi Bluetooth
2. Siirry mobiililaitteesi Bluetooth-asetuksiin
3. Valitse laite nimeltä "scooter" (katso kuva 13)
4. Syötä PIN-koodi "0000" ja muodosta yhteys
5. Kun yhteys on muodostettu, Bluetooth-kuvake näkyy näytöllä (katso kuva 12)
6. Toistaaksesi ääntä, siirry mobiililaitteesi äänisovellukseen ja paina Toista
7. Sääda äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden lisäys-/vähennyspainikkeilla (katso kuva 2).
8. Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen painamalla vasenta ja oikeaa painiketta



Kuva 12 – Bluetooth-yhteys aktiivinen

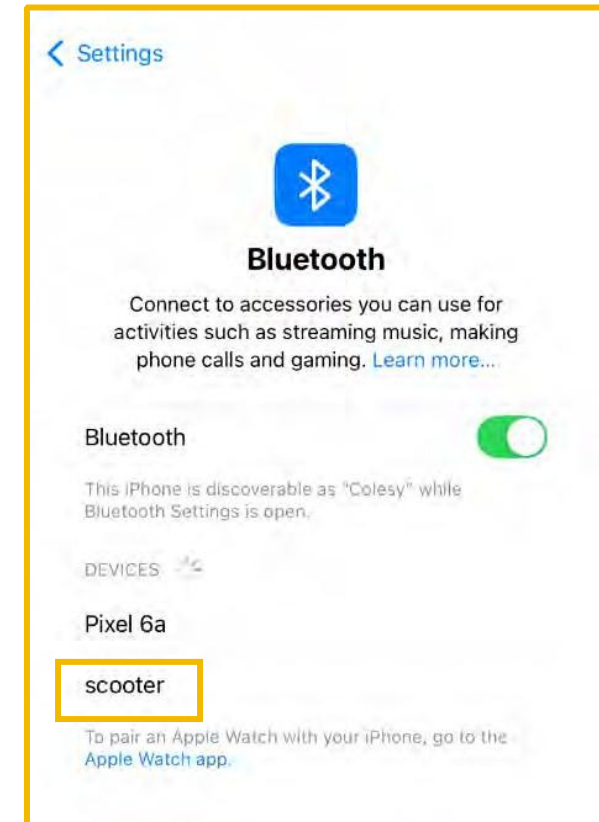

Kuva 13 – Bluetooth-puhelimen asetukset

## 5.12 Näytön peilaus

X-950-digitaalinen värinäyttö voi peilata mobiililaitteesi (Android tai iOS) näytön. Peilaa matkapuhelimesi näyttö

seuraavien ohjeiden mukaisesti:


1. Käynnistä X-950 ja yhdistä matkapuhelimesi skootteriin Bluetoothin kautta (katso 5.11)
2. Lataa EYLINK-sovellus matkapuhelimesi App Storesta (katso kuva 14).
3. Avaa EYLINK-sovellus ja kirjaudu sisään Apple- tai Google-tililläsi.
4. Salli sovellukselle kaikki pyydetyt käyttöoikeudet: sijainti, media, mikrofoni, Bluetooth ja ilmoitukset.
5. Valitse laite luettelosta, joka alkaa kirjaimilla "EDG", tai paina "Yhdistä kojelautaan".
6. Kun sinua pyydetään, liity Wi-Fi-verkkoon "iteAP" ja odota yhteyden muodostumista.
7. Paina "Screen Mirroring" (Näytön peilaus), paina "Start Screen Mirroring" (Aloita näytön peilaus) ja paina "Start Broadcast" (Aloita lähetys).
8. Matkapuhelimen näyttö peilataan skootterin digitaaliseen värinäyttöön.
9. Avaa mobiilisovellus, jota haluat katsella, esim. äänisoitin tai navigointi.
10. Kallistamalla puhelinta vaakasuoraan asentoon digitaalinen värinäyttö kääntyy vaakasuoraan asentoon.
11. Aseta matkapuhelimesi ylösalaisin skootterin matkapuhelintelineeseen.

**VINKKI – Aseta puhelin pidikkeeseen ylösalaisin.**

**Kun asetat sen oikein päin, digitaalinen värinäyttö kääntyy pystyasentoon.**

Voit lopettaa näytön peilauksen matkapuhelimesta seuraavasti:

1. Siirry EYLINK-sovellukseen ja paina "Exit Screen Mirroring" (Poistu näytön peilauksesta).
2. Digitaalinen värinäyttö palaa takaisin käyttöruutuun.

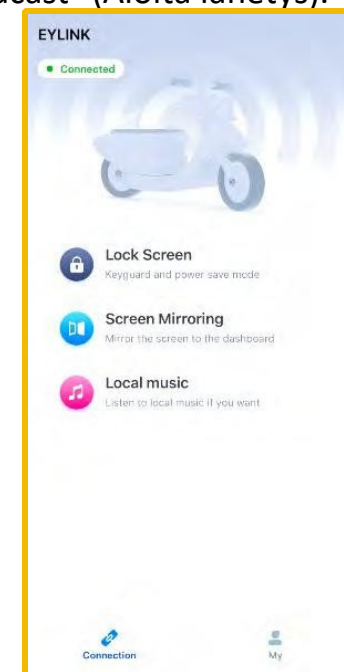

Kuva 14 – EYLINK-sovelluksen kuvake Kuva 15 – EYLINK-sovellus

## 6.13 USB-latausportit

X-950 on varustettu USB-latausporteilla ohjauspylvään oikealla puolella. **Portti 1** sijaitsee LED-valon vieressä


ja **portti 2** oikealla puolella.

**USB-portti 1:** Vain dataportti

Tätä porttia voidaan käyttää äänitiedostojen toistamiseen USB-aseilta.

**USB-portti 2:** Vain latausportti

Tätä porttia voidaan käyttää matkapuhelimen ja tablettien lataamiseen.

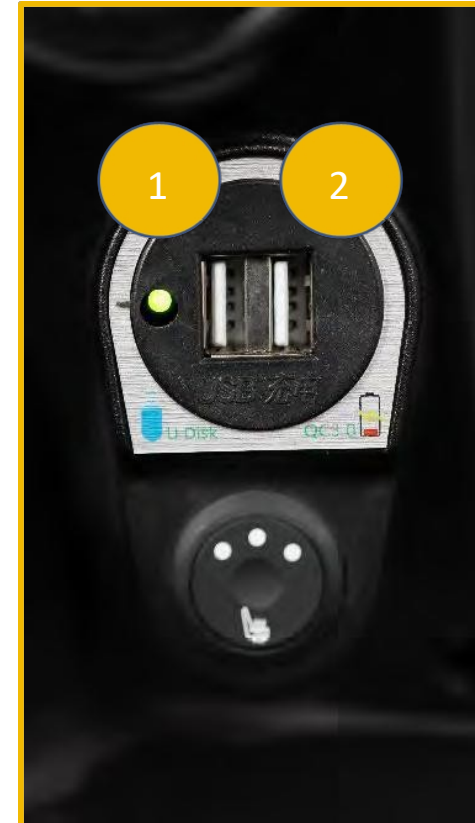

Kuva 16 – USB-latausportit

## 6.14 Pullon ja matkapuhelimen pidike

X-950-mallissa on kaksi muovista valmistettua pidikettä. Niissä voit säilyttää turvallisesti pullotettuja juomia ja matkapuhelintasi.

**TÄRKEÄ VINKKI – Pullotelinettä ei saa käyttää alkoholijuomien säilyttämiseen.**



Kuva 17 – Ohjaustankoon asennettu kuppi- ja matkapuhelinteline

## 6.15 Laukkupidike

Skootterin ohjauspylvääseen on integroitu kätevä laukkujen pidike. Tätä pidikettä voidaan käyttää henkilökohtaisten laukkujen tai ostosten säilyttämiseen.

Voit avata pidikkeen painamalla pidikkeen alaosaa, jolloin pidike työntyy kohti sinua. Pussipidike kestää **enintään 2,5 kg:n painon**.



Kuva 18 – Pussipidike

## 6.16 Latausportti

X-950 voidaan ladata ohjauskahvan latausportin avulla.

Portti sijaitsee ohjauskahvan oikealla puolella. Lataa ajoneuvo liittämällä mukana toimitettu latauskaapeli porttiin.

Kun X-950 on lataustilassa, se ei siirry ajotilaan.

**TÄRKEÄ VINKKI** – Paras käytäntö on ladata akut jokaisen käytön jälkeen. Akkuja ei voi ylikuormittaa, koska laturi katkaisee virran automaattisesti, kun se havaitsee akun olevan täynnä.

Jos et aio käyttää skootteria pitkään aikaan, suosittelemme lataamaan akut vähintään kerran viikossa.

Tämä varmistaa, että ne pysyvät kunnossa ja ovat valmiina säännölliseen käyttöön.



Kuva 19 – Ohjaustankoon asennettu latausportti

## **7 Huolto**

### **7.1 Polttimoiden vaihto**

LED-valot ovat energiatehokkaita ja pitkäikäisiä, mutta ne voivat lopulta vaatia vaihtamista. LED-lamput voi ostaa X-950-laitteen toimittajalta. Lamppujen vaihtaminen tulee suorittaa vain valtuutettu jälleenmyyjä, koska se edellyttää laitteiden purkamista, jotka on suljettava uudelleen alkuperäisten valmistajan ohjeiden mukaisesti.

### **7.2 Akun hoito**

Akkujen tarkastamiseksi istuin on irrotettava. Irrota molemmat lämmitettävän istuimen liitännät ennen istuimen irrottamista. Irrota istuin tarttumalla istuimen alla oikealla puolella olevaan mustaan vipuun ja vetämällä sitä ajoneuvon etuosaa kohti. Istuin voidaan sitten irrottaa vetämällä sitä suoraan ylöspäin.

X-950-mallin akkuja ei tarvitse huoltaa päivittäin, mutta niihin voi olla tarpeen päästä käsiksi. Akut sijaitsevat istuimen alla, ja ne on suojattu mustalla muovikotelolla, joka on kiinnitetty kuudella ruuvilla.


Kun huolto on suoritettu, varmista, että ruuvit kiinnitetään takaisin paikoilleen, jotta akkukansi pysyy tukevasti paikallaan. Aseta istuin takaisin paikalleen ja varmista, että se lukittuu paikalleen.

## 7.3 Sulakkeet

X-950-mallissa käytetyt sulakkeet ovat käytettävissä ohjausvivun etuosassa olevan peitetyn luukun kautta. Sulaketauluun pääsee käsiksi vetämällä kiinnitysklipsiä alaspäin ja liu'uttamalla kansi pois paikaltaan. Sulakkeiden vaihto on jätettävä ammattilaisille, sillä virheellinen toiminta voi vahingoittaa sähköjärjestelmää.



**Kuva 21 – Sulakekotelon sijainti**

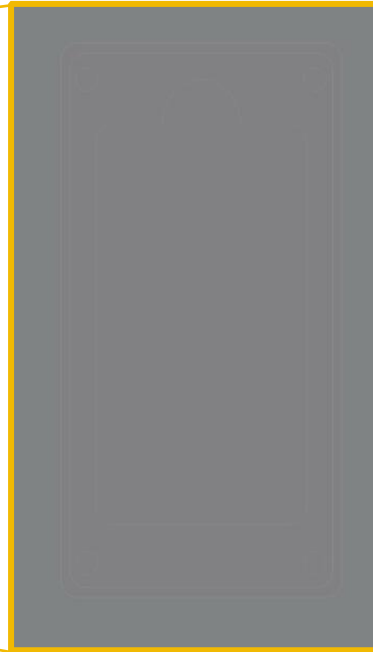

**Kuva 22 – Sulakekotelon kansi**

## 7.4 Rengaspaineet

X-950:n renkaat on suunniteltu tarjoamaan hyvä tasapaino mukavuuden ja energiatehokkuuden välillä. Väärin täytetyt renkaat voivat heikentää ajettavuutta, lyhentää toimintasädettä ja lisätä kulumista. Renkaiden kulutuspinnan syvyyden tulee olla vähintään 3 mm, jotta ne tarjoavat riittävän pidon tienpinnalla. Jos renkaat ovat kuluneet, ne on vaihdettava ennen X-950:n uudelleen käyttöä.

Eturenkaiden ilmanpaine: 35 psi

Takarenkaiden ilmanpaine: 35 psi

## 7.5 Puhdistus ja huolto

### 7.5.1 Kumimatot

Kumimatto tulee puhdistaa imurilla, johon on kiinnitetty verhoiluharja. Tahrojen poistamiseen voidaan käyttää mietoa verhoilunpesuaine- ja vesiseosta, mutta varmista, että alue kuivataan huolellisesti sen jälkeen.

**TÄRKEÄ VINKKI – Älä käytä valkaisuaineita.**

### 7.5.2 Maalipinta

Maalin hoitoon X-950 on pestävä säännöllisesti pehmeällä liinalla ja miedolla autojen pesuaineella. Kiiltävän lopputuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää autojen kiillotusainetta. Kiillotusainetta on erittäin suositeltavaa käyttää alueilla, joilla maalipinta voi altistua epäsuotuisille sääolosuhteille.

**TÄRKEÄ VINKKI – Älä koskaan käytä kiehuvaa vettä X-950:n puhdistamiseen.**

## 8 Takuu

R7SM-PRO-laitteella on 12 kuukauden valmistajan takuu, kun se ostetaan uutena valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuuajana kaikki osat, jotka vioittuvat valmistus- tai materiaalivirheen vuoksi, korjaa jälleenmyyjä, jolta laite on ostettu. Jos korjaus ei ole mahdollista, laite korvataan uudella.

Jos valmistusvirhe havaitaan, siitä on ilmoitettava kirjallisesti jälleenmyyjälle, jolta R7SM-PRO on ostettu, 28 päivän kuluessa ostosta.

Tuotteet, joiden käyttöikä on rajoitettu, kuten akut ja renkaat, eivät kuulu takuun piiriin, jos niiden katsotaan kuluneen liikaa tai käytetyn väärin.

Takuu ei kata tuotteen virheellisestä käytöstä, jälkimarkkinoilla tehdyistä muutoksista tai vahingossa aiheutuneista vaurioista johtuvia vahinkoja. Takuu ei ole siirrettävissä.

Takuu ei kata vian korjaamisesta aiheutuvia välillisiä kustannuksia, rahti- ja matkakustannuksia, ansionmenetyksiä, kuluja jne.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

## 9 Tekniset tiedot

### 9.1 Tekniset tiedot

|                  |                                                                                  |                |                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>Moottori</b>  | Takavetoinen suljettu vaihteisto 950 W (4-<br>napainen)<br>24 V DC               | <b>Akut</b>    | Kaksi 12 V 75 Ah tai 55 Ah |
| <b>Kojelauta</b> | Digitaalinen värinäyttö<br>16-painikkeinen ohjausvipu<br>Maksiminopeuden valinta | <b>Renkaat</b> | Ilmarengas                 |

## 9.2 Koot ja painot

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Pituus         | 1440 mm                        |
| Leveys         | 735 mm                         |
| Korkeus        | 1350 mm                        |
| Moottorin teho | 950 W                          |
| Ohjain         | PG120A                         |
| Jarrut         | Sähkömagneettiset/hydrauliset  |
| Paino          | 114 kg (ilman akkuja)          |
| Kantavuus      | 220 kg                         |
| Maavara        | 155 mm<br>(kuormittamattomana) |
| Renkaat        | 13 tuuman ilmarenkaat          |
| Pyörät         | 8 tuuman kevytmetallivanteet   |
| Suurin nousu   | 12 astetta                     |
| Kääntösäde     | 2100 mm                        |

1 Kansainväliset nopeudet: Saatavilla riippuen lainkäyttöalueesta ja paikallisesta lainsäädännöstä.

2 Toimintasäde voi vaihdella akun varauksen/kunnon/lisävarusteiden, maaston tyyppin, renkaiden kunnon ja ajoneuvon kuormituksen mukaan.

3 Valmistustoleranssien ja jatkuvan tuotekehityksen vuoksi näissä teknisissä tiedoissa voi olla +/-3 %:n vaihtelua.

4 Vaihtelee käyttäjän painon, maaston tyyppin, akun varauksen, akun kunnon ja renkaiden kunnon mukaan.