

# Rollator Flex

## ANVÄNDARMANUAL



**BLIMO**  
**HJÄLPMEDEL**

# Produktöversikt



## Förklaring av rollatorordelar:

1. Ryggstöd

2. Väska i mesh

3. Framhjulslås

4. Framhjul

5. Bakhjulslås

6. Bakhjul

7. Knapp för inställning av höjd

8. Hopfällbart säte

9. Bromshandtag

10. Handtag/armstöd

## I kartongen:

Rollator Flex

Manual

Väska i mesh

# Monteringsanvisning

## Steg 1: Montera framhjul

Håll den röda knappen intryckt som på bilden. Sätt sedan dit hjulet.

När hjulet klickar till så sitter det fast ordentligt.



## Steg 2: Fäll ned bakhjul

Skjut ned den röda knappen för att låsa upp bakhjulets ben. Fäll ned benet.

Skjut sedan tillbaka den röda knappen. Ett klick ska höras när den är fäst igen.

Känn efter på hjulet och benet så att det sitter ordentligt.



## Steg 3: Montera säte

Fäll ut rollatorn. Tryck till på sätets kanter tills det hörs ett klick.

Känn efter så att sätet sitter fast ordentligt.



## Steg 4: Montera väska

Montera väskan på sätet enligt bilden.



## Justera höjd på handtag/armstöd


Tryck in den lilla knappen markerad på bilden för att justera handtagen/armstöden till en passande höjd.

Se till att båda sidor är inställda på samma höjd.



## Bromsa rollatorn

Håll in båda bromshandtag för att stanna rollatorn.

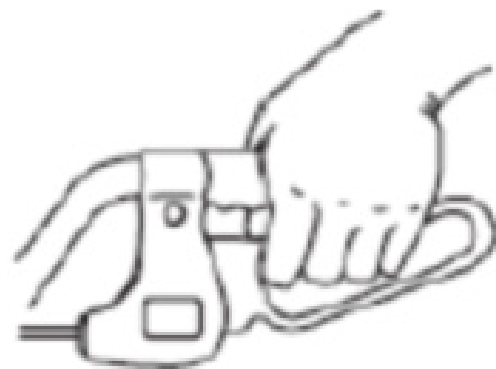

## Parkera rollatorn

Tryck båda bromshandtag utåt tills de klickar till för att parkera rollatorn.

Tryck in dem igen till neutral position för att släppa på parkeringsläget.


**OBSERVERA!** Ställ alltid rollatorn i parkeringsläge innan du sätter dig ned på rollatorn.



## Fälla ihop rollatorn

Dra i handtaget på sätet för att kunna fälla ihop rollatorn.

Om rollatorn ska ställas undan för förvaring, genomför därefter steg 1-3 i omvänd ordning.

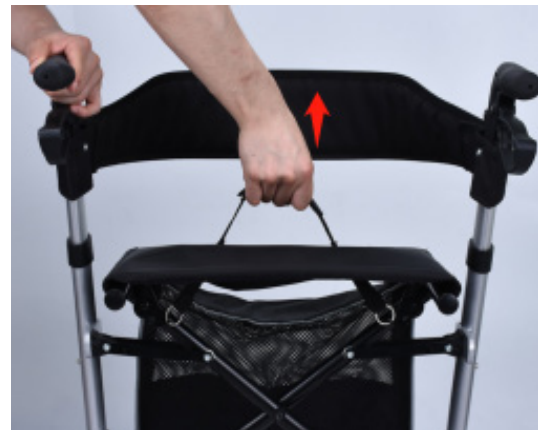

## Kontaktuppgifter

**Adress:**

BLIMO.se  
Nordbutiker i Sverige AB  
Gösvägen 28  
761 41 Norrtälje  
Sverige

**Företagsuppgifter:**

Nordbutiker i Sverige AB  
Vi innehar F-skattebevis  
Org. nr: 556908-9385

**Telefon/E-post:**

Telefon: 08-522 309 80  
E-post: [info@blimo.se](mailto:info@blimo.se)  
Hemsida: [www.blimo.se](http://www.blimo.se)

**BLIMO**  
**HJÄLPMEDEL**